



Опоры-ходунки Smart

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	7

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков Smart. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Опоры-ходунки Smart являются полностью разборными. Данные ходунки оснащены сумкой (съёмной), сиденьем, ручным тормозом, держателем для трости. Продаются в индивидуальной упаковке.

1.2 Технические характеристики

складная	+
сиденье	нейлоновое
шаг регулировки высоты, см	2
регулировка высоты ручек, см	80-92
расстояние между ручками, см	55
корзина/сумка	съёмная нейлоновая сумка
вес, кг	7,5
габариты, см	65x65x80
макс. нагрузка, кг	114

1.3 Упаковка

В комплектации: ходунки, винты - 2 шт., руководство по эксплуатации.



2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на изделие не должно превышать 114 кг.

2.2 Порядок работы

1. Распакуйте коробку. Раскройте ножки опор-ходунков, используйте винты. Поверните колеса в правильное направление (по направлению движения). Ослабьте ремень, используйте винты для фиксации задних ножек ходунков. Используйте винты для фиксации передних ножек ходунков. Убедитесь, что все винты затянуты.
2. Раскройте раму. Надавите на раму сиденья, пока не услышите щелчок. Сиденье зафиксировано.
3. Отрегулируйте высоту ручек, используя кнопки-фиксаторы.
Осторожно! Отверстия диаметром 8-8,2 мм могут быть опасны для детей. Держите пальцы детей подальше от них.
Нажмите на кнопки-фиксаторы и отрегулируйте желаемую высоту. Убедитесь, что все кнопки находятся на одинаковой высоте.
4. Закрепление сумки. Повесьте ручки сумки на раму сиденья, закрепите ленты на раму. (Максимальная нагрузка сумки – 5 кг).
5. Держатель трости.



6. Завершение сборки и использование тормоза.

Перед тем как сесть на сиденье ходунков, опустите вниз петли на ручках. Убедитесь, что колеса не двигаются, а сиденье прочно зафиксировано. Медленно опуститесь на сиденье ходунка.

- - для того, чтобы временно остановить ходунок, поднимите петли ручек наверх;
- - для того, чтобы заблокировать колеса, встаньте между ручек и опустите вниз округлую часть петель до характерного щелчка;
- - для того, чтобы снять тормоза, встаньте между ручек и поднимите наверх петли ручек.

3. техническое обслуживание

Протирайте раму опор-ходунок с помощью мягкого очищающего средства, воды и щетки.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Опоры-ходунки Smart
Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

Приложение 1

1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «СИМС-2»

(Наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г.Москве

Основной государственный регистрационный номер 1027739438902 от 02.05.2012

(Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
ИНН 7734197385

125363, г. Москва, ул. Новоселовская, дом 6

тел. (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, info@sims2.ru

(адрес, телефон, факс)

в лице

Генерального директора Бадаляна Саргиса Павели

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет,

что

ОПОРЫ-ХОДУНКИ: АРТ. 10180 (ВЫСОТА 66-81 СМ.; ВЫСОТА 80-95 СМ.), АРТ. 10180-3W, АРТ. 10180-W, АРТ. 10181, АРТ. 10184HR, АРТ. 10184, АРТ. 10185 (ВЫСОТА 47-64 СМ.; ВЫСОТА 59-78 СМ.), АРТ. 10185-BA, АРТ. 10188 (ВЫСОТА 65-82 СМ.; ВЫСОТА 82-94 СМ.), АРТ. 10189, АРТ. ROLL DUO, АРТ. ROLL TRIO, АРТ. ROLL QUATTRO, АРТ. ROLL PUSH, АРТ. ROLL EURO, АРТ. QUICK, АРТ. SMART,

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ: АРТ. 10020 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА НА ХОДУНКИ, АРТ. 10038 - РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА НА ХОДУНКИ, АРТ. 10173 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10174 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10175 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10176 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10177 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ, АРТ. 10178 - КОЛЕСА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ С ПОВОРОТОМ НА 360, АРТ. 10179 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРА К ОПОРАМ-ХОДУНКАМ МОДЕЛЕЙ (10184, 10185)

Изготовитель продукции: VALENTINE INTERNATIONAL LTD (ВАЛЕНТАЙН ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД), 8TH FLOOR, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien, Тайвань (Китай); ЗАВОДЫ:
- ZHONGSHAN GENTRY HARDWARE PRODUCTS CO. LTD., №152 WU FU ROAD, HSEIN YIN INDUSTRIAL AREA, TAINAN HSIEN, CHINA (КИТАЙ)

- ST. YORK ENTERPRISE CO., LTD., №12, LANE 300, GUANGDE RD, TAIPING CITY, TAICHUNG COUNTRY, TAIWAN, CHINA (КИТАЙ)

- FOSHAN NANHAI R. POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD, NEW CITY DISTRICT, DANZAO, NANHAI, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA (КИТАЙ)

- Shanghai Xinde Hardware Factory, Beiguan Village, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China (Китай)

Код ОК 005 (ОКП) 94 5150 Код ТН ВЭД СНГ 9021 10 100 0

(Наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ)

Серийный выпуск

(Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, ревизия договора, накладная, наименование изготовителя и т.п.))

ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010, ГОСТ Р 51632-2000,

соответствует требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011

(Обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией с указанием пунктов, содержащих требования для данной продукции)
Декларация принята на основании

протоколов испытаний: №№ 1739.014, 1687.014 от 21.05.2014 ИЛ ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России (№ РОСС RU.0001.21ИМ33);

№ 1124/14 от 16.05.2014 ИЦП ООО "ПСА" (РОСС RU.0001.21ИМ54)

регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2011/09870 от 21.06.2011

(Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 16.05.2014 Декларация о соответствии действительна до 15.05.2019



С.П.Бадалян

(Инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро- машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ»)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ77.

141400 ХИМКИ Московской области, ул. Ленинградская, 29

Тел. (495)7812587, факс (495)7812588, e-mail: oc@anogemc.ru

(Наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

№ РОСС ТW.МЕ77.Д00351 от 16.05.2014

(Дата регистрации и регистрационный номер декларации)



Д.А.Дружинин

(Инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

Для заметок